



## TALİMATLAR

### ETÜV CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Yayın Tarihi	01/03/2009
Dokümantasyon No	KYB-T.11
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	11

1. Cihazın on/off düğmesi “on” konumuna getirilir.
2. Sıcaklığın 180 C ye gelmesi beklenir.
3. 180 C ye geldikten sonra kapak açılır ve dezenfeksiyonu yapılmış kurutulmuş ve tepsiye yerleştirilmiş aletler etüve yerleştirilir
4. Daha sonra kapak kapatılır.
5. İşlem bittikten (1 saat) sonra steril olan aletler çıkartılır.
6. Kapak kapatılır ve “off” düğmesine basılarak etüv kapatılır.
7. Etüvden çıkan tepsinin ağzı tam kapatılır ve steril alet bölümüne alınır.
8. Steril olan aletler saat 08:00 de sterilizasyon personeli tarafından temiz taşıma arabası ile poliklinik personeline imza karşılığı teslim edilir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
<b>ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ</b>	<b>KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ</b>	<b>BAŞHEKİM</b>