



## TALİMATLAR

### DİŞ ÜNİTLERİNİN TEMİZLİK TALİMATI

Yayın Tarihi	01/03/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	21

1. Eldiven giyilir.
2. Her hastadan sonra kullanılan bardak,suction, pamuk, gazlıbez, ısırma kağıdı, eldiven, peçete vb malzemeler tıbbi atık kovasına atılır.
3. Kullanılan aletler kirli kabında toplanır.
4. Kan ve tükürük bulaşmış bölümler dezenfektanlı solüsyonla silinip eldiven tıbbi atık kovasına atılır.
5. Yeni eldiven giyilir, temiz malzemeler hazırlanır.
6. Her hastadan sonra işlem tekrarlanır.
7. Muayeneler sona erdiğinde ünitler daha kapsamlı temizlenmelidir.
8. Kan ve tükürük bulaşan yerler (1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile) önce temizlenir.
9. Ünitlerin oturma koltuğunun ayakucu bölümü ıslak bir peçete ile tozlarından arındırılır.
- 10.Daha sonra iki kap (birine su diğerine ise deterjan ve 1/100 oranında çamaşır suyu konulur) hazırlanır.
- 11.Bez önce deterjanlı suda yıkanır, sıkılır ve üniten önce reflektör ve tablası silinir.
- 12.Bez daha sonra duru suda yıkanır, sıkılır ve tekrar deterjanlı suda yıkayıp silme işlemi yukarıdan ayakucuna doğru yapılır.
- 13.Silme işlemi bittikten sonra kaplar yıkanır, durulanır ve kurulanıp yerine kaldırılır.
- 14.İşlem sonrası eller yıkanır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM