



TALİMATLAR

DEZENFEKTAN MADDE KULLANIM TALİMATI

Yayın Tarihi	06/03/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	26/07/2011
Revizyon No	03
Sayfa No	1/1
Talimat No	62

TOZ DEZENFEKTAN MADDE (ALET VE YÜZEY DEZENFEKTANI)

- Dezenfektan madde hazırlamadan önce koruyucu ekipmanlar kullanılır.
- Dezenfektan madde her sabah hemşire tarafından hazırlanır. (1 litre suya 20 mg toz dezenfektan madde katılır. 15 dk. karıştırılır gerektiğinde strip kullanılır.)
- Her hastadan önce ve sonra hemşire tarafından ünitlere 30cm uzaklıkta durarak püskürtme yüzey dezenfektanı sıkılır.
- Dezenfektan maddenin üniten tüm yüzeyi kapsadığından emin olunmalıdır. Kirli alana kullanılan dezenfektan madde silindikten sonra tekrar dezenfektan madde sıkılır ve silinir.
- Sıkılan dezenfektan madde steril bir kompresle veya kağıt havlu ile silinir.
- Şüphe duyulan (kontamine olan yerlerde) herhangi cam, ahşap,metal, vb. yerlere kullanılabilir.
- Dezenfektan madde günlük striplerle kontrol edilir ve strip kontrol formuna yazılır.
- Forma yazılı olan kayıtlar saklanmalı ve bir dosyada tutulmalıdır.
- Bu dezenfektan madde cerrahi aletlerde de kullanılabilir. Aletler solüsyon içinde 20 dk bekletilir. Daha sonra aletler durulanır ve kurulanır.
- Dezenfektan maddeye kaç defa alet koyulabileceği (etkinliği) stripler ile kontrol edilir ve kayıt altına alınır.

TIBBİ ALET DEZENFEKTANI

- İşleme başlamadan önce eldiven giyilir ve maske takılır
- Dezenfektanın bakterisit, fungosit, virüsit, sporosit etkileri vardır
- Solüsyon direkt cilde temas ettirilmemelidir.
- (Discleen Endo PAA) aktivatör şisesinin tüm içeriği 5 lt lik Baz (Discleen Endo PAA) bidonuna boşaltılır.
- Bidonun ağzı sıkıca kapatılarak iyice çalkalanır.
- Karışım kullanılmadan önce 10 dk beklenir.
- Hazırlanmış solüsyona başka bir katkı maddesi konulmaz.
- Hazırlanan solüsyon 7 gün süreyle kullanılabilir. Daha sonra yenisi hazırlanır.(Dezenfektan maddenin etkinliğinden şüphe edildiğinde striplerle kontrol edilmelidir.)
- Hazırlanan solüsyonun üzerine hazırlama tarihi ,saati ve hazırlayan kişinin adı yazılır.
- Hazırlanan solüsyona aletler konulur,
- Solüsyon aletlerin tüm yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.
- Hazırlanmış solüsyon içinde aletler 15 dk bekletilir, daha sonra aletler durulanır ve kurulanır.
- Dezenfektan madde günlük striplerle kontrol edilir ve strip kontrol formuna yazılır.
- Forma yazılı olan kayıtlar saklanmalı ve bir dosyada tutulmalıdır . Dezenfektan madde yüzeyde de kullanılabilir

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON HİZMETLERİ BÖLÜM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM