



## TALİMATLAR

### ULTRASONİK YIKAMA CİHAZINI KULLANIM TALİMATI

Yayın Tarihi	05/05/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	67

1. Merkezimizde kullanılan cerrahi el aletlerinin en kısa zamanda yıkama ve dezenfeksiyonu sağlanır.
2. Cihazın suyu kontrol edilir.
3. İçindeki suyun seviyesi cihazın iç tarafında çizgiye kadar su doldurulur.
4. İçine 360 ml dezenfektan madde konulur.
5. Cihazın ön tarafında bulunan **Power** (Başlat) düğmesine basılır.
6. Kontrol panelinde sıcaklık, güç ve zaman ayarı bulunmaktadır. Güç (titreşim gücü) ayarının en ideal ayarı 99 olmalıdır ( En yüksek ayarı 99, orta ayarı 75, düşük ayarı ise 50 olarak nitelendirilmektedir ).
7. Cihazın ideal sıcaklığı 50 - 60<sup>0</sup> C olmalıdır.
8. Sıcaklık 50-60<sup>0</sup> C “ye ulaşıktan sonra yıkama zamanı 15 dakikaya ayarlanır.
9. Bu süre yıkama ve dezenfeksiyon için yeterlidir
10. Yıkama işlemi bittikten sonra aletler durulanır, kurulama yerine konur.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM