



TALİMATLAR

YIKAMA CİHAZI KULLANIM (M4 İNNOVA) TALİMATI

Yayın Tarihi	05/05/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	68

1. Makinenin dozaj kontrolleri yapıldıktan sonra açma düğmesini çevirerek açılır.
2. Açma valflerini açtıktan sonra (sıcak ve soğuk su , kullanılan dezenfektanların girişleri otomatik olduğu için) uygun program seçilir.
3. Yıkama sepetindeki aletlerin kaba kirleri alındıktan sonra, basınçlı hava tabancasıyla kurulaması sağlanır.
4. Kurulama sağlandıktan sonra yıkama arabasıyla makineye yerleştirilir.
5. Yıkama arabasının doğru yerleştiğinden emin olunması gerekir.
6. Makinenin kapağını kapattıktan sonra uygun program seçilir. Makinede P1-P2-P3 yedek programları mevcuttur..Ayrıca T ve V tuşları ile yıkamadan emin olmadığımız zaman yıkama için V, ekstra kurutmak için T tuşlarına basılır.
7. Bize en uygun yıkama programı P2 ve P3 programlarıdır.(P3 programında cerrahi el aletleri yıkama programıdır.)
8. Yıkama dezenfeksiyon ve kurutma işlemi bir arada yapıldığı için dezenfektan maddeleri günlük kontrol edilmelidir,
9. Seviyenin altında ise dezenfektan madde eklenmelidir.
10. Makine ile dezenfektan madde arasındaki bağlantı hortumları kontrol edilmelidir.
11. Bağlantı hortumlarında herhangi bir katlanma veya tıkanma dezenfeksiyonu etkileyecektir.
12. Yıkama işlemine başlarken start düğmesine basılır, uygun program seçilir.
13. Yıkama işlemi sürerken herhangi bir uyarı geldiğinde, **Stop** düğmesine basıp arıza giderilmelidir.
14. Yıkama işlemi tam olarak 90 dk sürer ve işlem bittiğinde cihaz uyarı verir.
15. Kapağı açılıp steril bir örtü üzerine konular, paketleme işlemine başlanır.
16. Cihazda kullanılan dezenfektan maddeleri, cihazın her kullanımında kontrol edilir.
17. Solüsyonlar eksik ise ilave edilir.
18. Dezenfektan solüsyon konteynerları değiştirildiğinde kapakları, sadece sıcak suya daldırıp birkaç dakika bekletilir.
19. Tekrar yerine takılır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM