

TALİMATLAR

OTOKLAV YÜKLEME VE BOŞALTMA TALİMATI

Yayın Tarihi	29.05.2009
Dokümantasyon No	KYB T 02/73
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	73

- 1- Otoklava yerleştirilecek aletler ön dekontaminasyon ve yıkama işlemi takiben buharı geçirecek ve sterilizesini koruyacak özellikte materyalle paketlenir.
- 2- Paketlenmiş aletlerin ağırlığına göre konteynırlara yerleştirilir.
- 3- Otoklav içindeki araba otoklav yükleme arabasına alınır.
- 4- Konteynırlar oda numarasına göre yerleştirilir.
- 5- Alet ağırlığı (yüklenen) 11 kg dan fazla olmamalıdır.
- 6- Alet konteynırları kesinlikle sterilizatör kabın duvarına değmemelidir.
- 7- Otoklav kabininin % 70 inden fazla doldurulmamalıdır.
- 8- Yükleme arabası otoklavın içine yerleştirilir
- 9- Sterilizasyon işlemi bittikten sonra otoklavın sterilizasyon biriminin steril tarafındaki kapısı açılır.
- 10- Yükleme arabası sterilizatörün içinden çıkartılır. Bu işlem yapılırken ısıya dayanıklı eldiven kullanılmalıdır veya ısıya dayanıklı bir bezle tutulmalıdır.
- 11- Steril edilmiş aletler üzerinde gözle görülür bir ıslaklığın olması veya paket içinin nemli olduğu durumlarda, aynı zamanda sterilizasyonu gösteren testlerde olumsuzluk gözlemlendiğinde aletler tekrar steril edilmelidir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİMİ SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM