



TALİMATLAR

OTOKLAV TEMİZLEME TALİMATI

Yayın Tarihi	29/05/2009
Dokümantasyon No	KYB T 02/77
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	77

1-Otoklav normal durumda ise sıcak su doğal sabun veya şampuanla(kimyasal madde içermeyen) yıkanır ve durulanır.

2-Yüzeysel veya kaba kirler varsa sıcak su ve oksidasyona sebep vermeyecek detarjanlarla yıkanır ve durulanır.

3-Sterilizatörün içinde tabaka oluşturacak kadar kalın ve yoğun kirlenmeler oluşmuş ve kalın tabaka ilk kez görülüyorsa uygun temizleyiciler kullanarak temizleme yapılır.

4-Yüzeyler için uygun bir eritici pasta sürüp ovalanarak temizlenir. Daha sonra su ile yıkanır.Çok titiz bir tarzla ,özellikle köşeler temizlenir.

5-Kapı contalarının temizliği için alkol ve tank pudrası kullanılır.

6-Paslanmaz çelik yüzeyleri aşındırmayacak solüsyon veya su kullanılmalıdır.

7-Tüy bırakmayan bezler kullanılmalıdır.

8- Temizlik yapılırken cihazı tahriş edici alet kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİMİ SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM