



TALİMATLAR
FREZLER İÇİN
DEZENFEKTAN
MADDE HAZIRLAMA
TALİMATI

Yayın Tarihi	29/05/2009
Dokümantasyon No	KYB T 02/78
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	78

1. Hazırlayan kişi maske, **gözlük** ve eldiven takar.
2. Bir litre suya (su sıcaklığı en fazla 20 °c olmalı) bir ölçek toz dezenfektan madde konulur.
3. Hazırlama kabı 2 lt'lik olduğu için, 2 lt suya 2 (40 mg)ölçek dezenfektan madde konulur.
4. Hazırlayan kişi 5-10 dk solüsyonu karıştırarak çözülmesini sağlar.
5. Hazırlanan solüsyonun kapağına hazırlama tarihi, son kullanma tarihi ve saatlerini belirten etiket yapıştırılır.
6. Dezenfektan madde geçerliliği 24 saattir ve 24 saatte bir tekrarlanır.
7. Frezler hazırlanan solüsyon içerisinde 10 dk. bekletilir.
8. 10 dk. sonra çıkartılarak, durulanır.

HAZIRLAYAN STERİLİZASYON BİRİMİ SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
--	---	-------------------------------------