



## TALİMATLAR

### ÖLÇÜ DEZENFEKTANI KULLANIM TALİMATI

Yayın Tarihi	29/05 /2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02/79
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	79

1. Hazırlayan kişi maske ve eldiven takar.
  2. Bir litre suya (su sıcaklığı en fazla 24 °c olmalı) bir ölçek yani yaklaşık olarak 8 mg dezenfektan konularak hazırlanır.
  3. Hazırlanan solüsyon 5 dakika kadar karıştırılıp, erimesi sağlanır.
  4. Hazırlanan solüsyon sprey kutularına konulur.
  5. Sprey kutularının üzerine hazırlama tarihi, son kullanma tarihi ve saatlerini belirten etiket yapıştırılır.
  6. 24 saatte bir bu işlem tekrarlanır.
- NOT: Poliklinikte o güne ait ölçü sayısı az ise; bu solüsyon yarım litre olarak hazırlanabilir.

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>STERİLİZASYON BİRİMİ</b> <b>SORUMLUSU</b>	<b>KONTROL EDEN</b> <b>KALİTE YÖNETİM BİRİMİ</b> <b>DİREKTÖRÜ</b>	<b>ONAYLAYAN</b> <b>BAŞHEKİM</b>
--	---	-------------------------------------