



TALİMATLAR

YIKAMA CİHAZI ARABASI YÜKLEME VE BOŞALTMA TALİMATI

Yayın Tarihi	29/05/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02/80
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	80

1. Yükleme ve boşaltma arabası iki bölümden oluşmaktadır.
2. Alt bölüm sabittir ve hareket ettirilemez.
3. Üst bölüm hareketlidir, ön tarafında hareketini sağlayan bir dümen vardır.
4. Yükleme arabası yıkama cihazının önüne getirilir, cihazın kapağı açılır
5. Arabanın ön panelinde bulunan dümenin ayarı yıkama makinesine göre ayarlanır
6. Taşıma arabasının ön tarafı yıkama cihazının ön kapağının üzerine yerleştirilir.
7. Taşıma arabasının dümeni sabitleştirilir ve sağa –sola hareket etmesi engellenir.
8. Yıkama cihazındaki aletler, yükleme arabasına alınır.
9. Yükleme arabası ,aletleri yıkama cihazına yerleştirirken ve boşaltırken kullanılır. Aletleri taşımak için kullanılmaz
10. Her işlem sonrası arabanın tamamı silinir ve kurulur.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİMİ SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM