



TALİMATLAR

BİYOLOJİK İNDİKATÖRLERİN KULLANIM TALİMATI

Yayın Tarihi	29.05.2009
Doküman No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	82

1. Biyolojik indikatörler basillus steorothermophilus sporu içeren ve biyolojik ölümün gerçekleşip, gerçekleşmediğine referans olan indikatördür.
2. Her otoklav onarımından sonra ve haftada iki kez kullanılır.
3. Sonucun doğru olduğundan emin olduktan sonra malzeme kullanılmaya başlanır.
4. Biyolojik indikatörlerin testi için test bohçası veya sepet hazırlanır .indikatör paketin veya sepetin tam ortasına konulup otoklava yerleştirilir
5. Sterilizasyondan sonra cam tüp kırılır ve sporlar(medya) ile temas ettirilir.
6. Biyolojik indikatör 48 saat inkübatör cihazında bekletilir.
7. Normal oda sıcaklığında (15-30 derece , % 35-60 nem)bekletilebilir.
8. Üreme olmadığı zaman her hangi bir renk değişikliği olmaz. Renk kahverengi olduğu zaman üreme oluşunu gösterir.
9. Bu durumda aletler steril olmamıştır. Otoklav için gerekli onarım ve bakım yapılır.
10. Yükün hepsi tekrar steril edilir. Test tekrarlanır, uygun olup olmadığına karar verildikten sonra aletlerin polikliniklere dağıtımı yapılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

STERİLİZASYON BİRİMİ
SORUMLUSU

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
DİREKTÖRÜ

BAŞHEKİM