



TALİMATLAR

KİMYASAL İNDİKATÖRLERİN KULLANIM TALİMATI

Yayın Tarihi	29.05.2009
Doküman No	KYB-T-02/83
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	83

1. Kimyasal indikatör sterilize edilecek her paketin içinde kullanılmalıdır.
2. Kimyasal indikatör buharın en az ulaşılabilceği bölüme yerleştirilir.
- 3- Paketleme yapılırken her polikliniğin alet sepetinin içine bir adet yerleştirilir.
- 4-Kimyasal indikatör kullanım anında geri alınır ve kullanıcı tarafından yorumlanır.Kullanıcı bu değerlendirme sırasında çok dikkatli ve yeterli bilgiye sahip olmalıdır
- 5- İndikatör değerlendirmesi sonucu yetersiz buhar işlemi olduğu düşünüldüğünde paketin içindeki aletler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 6- İndikatörün değerlendirmesini yapan kişi arızayı yöneticisine mutlaka bildirmelidir.
- 7-Otoklavın gerekli bakım ve onarımları yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

STERİLİZASYON BİRİMİ
SORUMLUSU

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
DİREKTÖRÜ

BAŞHEKİM