



TALİMATLAR

KİRLİ ALET YIKAMA TALİMATI

Yayın Tarihi	29.05.2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02/84
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	84

1. Sterilizasyon birimine gelen kirli aletler yıkama bölümüne alınır
2. Önce enzimatik solüsyon içinde 5-10 dk bekletilir.
3. Alet yıkama yerinde aletler yıkanır, herhangi bir materyal kalmasın diye iyice fırçalanır.
4. Aletleri iyice duruladıktan sonra dezenfektan madde içine yerleştirilir.
5. Aletler dezenfektan madde içinde 20 dk bekletilir, bu işlem yapılırken solüsyon aletlerin üzerini tam kapatmalıdır.
6. Aletler 20 dk sonra çıkartılır ve durulanır.
7. Durulanan aletler temiz bir örtü üzerine serilir ve kurulanır.
8. Aletleri kuruladıktan sonra metal tepsilere yerleştirilir. (kritik ve yarı kritik aletler ayrıştırılır).
9. Bu aletler etüvde steril edilecek ise tepsilere konulur ve etüvlere yerleştirilir.
10. Otoklavda steril edilecek ise paketlenme bölümüne alınır ve paketlenir.
11. Paketlenen aletler sepetlere konulur ve otoklava yerleştirilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİMİ SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM