



TALİMATLAR

ENZİMATİK SOLÜSYON HAZIRLAMA TALİMATI

Yayın Tarihi	25-05-2009
Dokümantasyon No	KBY-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	03
Sayfa No	1
Talimat No	89

1. Enzimatik solüsyonu hazırlarken eldiven ,maske gözlük takılır.
2. Kirli alet yıkama yerinde hazırlanır.
3. Solüsyona herhangi bir katkı maddesi konulmadan enzimatik solüsyon kabına konulur.
4. Aletlerin üstünü kapatacak şekilde yaklaşık 4-litre konulur.
5. Hazırlanan solüsyon üzerine hazırlama tarihi ve saati yazılı bir etiket yapıştırılır.
6. Getirilen kirli aletler enzimatik solüsyonda en fazla 10 dk. bekletilir, kaşıklar 20-30 dk bekletilir.
7. Hazırlanan solüsyon yedi gün dayanır ,özelliğini kaybetmez.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM