



TALİMATLAR

AERATÖR VE MİKROMOTOR BAŞLIĞI BAKIM CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Yayın Tarihi	15.09.2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1
Talimat No	95

AMAÇ:

Hekimler tarafından kullanılan aeratör ve mikromotor başlıklarının düzenli olarak her gün yağlanması ve bakımının sağlanmasıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

- ✓ Aeratör ve mikromotor başlıkları cihaza yerleştirilmeden önce sterilizasyon personeli tarafından dezenfeksiyonu sağlanır daha sonra cihaza yerleştirilir.
- ✓ İşleme başlamadan önce cihazdaki yağ seviyesine bakılır.
- ✓ Sterilizasyon Birimine gelen aletler kontrol edilir, üzerinde frez var ise çıkartılır.
- ✓ Sterilizasyon Birim personeli tarafından dezenfekte edilir, ondan sonra yağlama cihazına yerleştirilir.
- ✓ Cihazın ön panelinde bulunan 1-2-3- nolu butonlar yağlama yapılacak aletlere göre numaralandırılmıştır.
- ✓ (1) nolu butonda angldrüva başlığı (E tipi kupling) takılır.
- ✓ (2-3) nolu butonda aeratör ve mikromotor başlığı kuplinge takılır.
- ✓ Aletlerin yerleştirilmesi bittikten sonra cihazın ön kapağı dikkatlice kapatılır.
- ✓ Cihazın yan tarafında bulunan güç düğmesine basılır.
- ✓ Cihazın ön tarafında bulunan **START** (Başlama) düğmesine basılır.
- ✓ Start düğmesine basıldıktan sonra cihaz yağlama ve temizleme işlemine başlayacaktır.
- ✓ Farklı harflerde olan göstergelerdeki lambalar yanacaktır. (S kısa, L uzun ve E daha uzun program demektir).
- ✓ Yağlama işlemi bittikten sonra cihaz gösterge lambaları uyarı verir.
- ✓ Sızan yağı ve kuplingi temizlemek için **AİR** tuşuna (hava basınç düğmesi) basılır.
- ✓ Yağlama ve temizleme işlemi bittiğinde durum göstergesi yanar.
- ✓ İşlem bittiğinde **ERROR** butonunda yanan ışık aynı zamanda hatalı işlem uyarısını da verir.
- ✓ Bütün işlem süresi toplam 1dk 30 sn veya 45 sn sürer.
- ✓ İşlem her gün mesai bitiminde tekrarlanır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BİRİM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM