



TALİMATLAR
ULTRASONİK CİHAZINDA
FREZLERİN DEZENFEKSİYON
VE STERİLİZASYON
TALİMATI

Yayın Tarihi	01/03/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	03
Sayfa No	1/1
Talimat No	96

1. Kullanılmış olan frezler bir fırça yardımıyla bol su ile tamamen temizlenir ve durulanır.
2. Yıkanan frezler sterilizasyon biriminde bulunan delikli frez kutusuna konulur.
3. Delikli frez kutuları ultrasonik cihaza yerleştirilir ve dezenfeksiyonu sağlanır. (15 dk)
4. Daha sonra frezler kutulardan çıkartılır,durulanır ve kurulanır .
5. Dezenfekte edilmiş frezler paketlenir ve ait olan hekimin adı yazılır.
6. Hazırlanmış paketler otoklav cihazına yerleştirilir ve steril olması sağlanır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM